

**SANYBIO – Sanitizante concentrado****08–050 – 500 mL****Ficha de Instruções de Uso****1. Uso pretendido**

SANYBIO é indicado para uma segura e rápida desinfecção de superfícies e equipamentos. O SANYBIO tem uma eficácia comprovada contra bactérias Gram positivas e Gram negativas, vírus, esporos e fungos.

SANYBIO pode ser utilizado para limpeza e desinfecção de diversos locais e utensílios médicos de uso hospitalar e laboratorial, incluindo consultórios e gabinetes médicos e odontológicos, clínicas e outros cuidados de saúde.

A linha descontaminante SANY, contém produtos especialmente desenvolvidos com a finalidade de tratamento e eliminação de microrganismos infecciosos e contaminantes.

**2. Descrição**

O sanitizante Sanybio é versátil, prático, seguro e eficiente. A solução concentrada deve ser diluída para aplicação entre 1,0 a 1,5% (em função da sujidade dos produtos tratados) em água.

**3. Modo de Uso**

- Utilizar entre 10mL a 15mL do SANYBIO para cada Litro de volume final.  
Observações importantes:
- Deixar os utensílios a serem tratados, na solução sanitizante, por aproximadamente 10 a 15 minutos.
- Não enxaguar os utensílios tratados com o Sanybio após sua aplicação. Deixar apenas secar.
- Quando utilizado em limpeza de superfícies e paredes recomenda-se aplicar o produto diluído, com auxílio de esponja de textura suave.
- Pode ser aplicado diretamente em superfícies sem necessidade de posterior enxague.
- Dependente da qualidade da água de uso, o produto poderá ter seu pH alterado.  
Características:
- Mistura de tenso-ativos que resultam numa solução catiônica concentrada, eficiente na remoção de contaminação e sujidades na superfície.
- pH: neutro (7,00 +/- 0,5)

**4. Armazenamento**

Conservar em local fresco e seco, temperatura ambiente.

**5. Validade**

O **SANYBIO** tem validade de 12 meses quando mantido fechado e armazenado corretamente.

**6. Precauções e cuidados especiais**

- Utilizar somente seguindo as instruções acima indicadas;
- Embora se trate de um produto ausente de toxicidade, evitar o contato direto com a pele, olhos e/ou roupas;
- Recomenda-se a utilização de luvas para aplicação do produto;
- Conservar a embalagem em local fresco e seco;
- Não reutilizar a embalagem vazia;
- Não misturar com outros produtos;
- Manter o produto em sua embalagem original.

### 7. Informação de Segurança

- Sempre que estiver trabalhando com soluções químicas e amostras biológicas, EPIs são necessários conforme normas de segurança regulamentadas.
- Depois de receber o produto verificar se as embalagens estão danificadas ou se há vazamento.
- Produto de uso apenas laboratorial e deverá ser armazenado em condições próprias para uso em laboratório.

Caso sejam necessárias mais informações a respeito do produto, favor entrar em contato com a **NOVA BIOTECNOLOGIA**.

### 8. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **SANYBIO** por ela fornecido contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.  
Exceções na garantia:
- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

### 9. Informações do Fabricante

**NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA**

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA - CRBM 20951

### 10. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

[www.novabiotecnologia.com.br](http://www.novabiotecnologia.com.br)

e-mail: [assessoria@novabiotecnologia.com.br](mailto:assessoria@novabiotecnologia.com.br) [sac@novabiotecnologia.com.br](mailto:sac@novabiotecnologia.com.br)